


Masażer do stóp

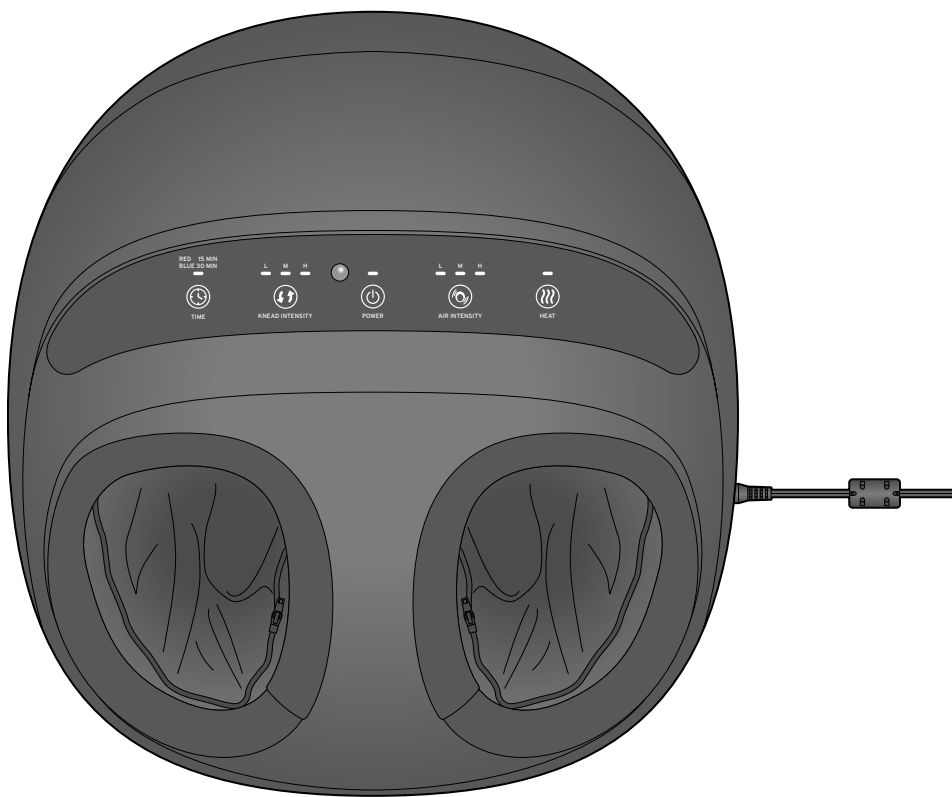

Drodzy Klienci!

Ten masażer do stóp jest wyposażony w obracające się głowice masujące z komorami ze sprężonym powietrzem, imitującymi naciskanie i ugniataanie wykonywane podczas refleksoterapii stóp.

Masażer do stóp może ...

- ... pobudzić ukrwienie stóp,
- ... wspierać regenerację komórek,
- ... rewitalizować i ożywiać stopy,
- ... usuwać skurcze.

W niniejszej instrukcji opisano bezpieczne i prawidłowe użycie masażera. Należy mieć świadomość, że nieprawidłowo przeprowadzony lub zbyt długo trwający masaż może – zamiast odprężyć – doprowadzić do skurczów mięśni.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	9	Wymiana baterii
3	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Czyszczenie i przechowywanie
6	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	11	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
8	Przygotowanie do użytkowania	11	Dane techniczne
8	Obsługa	12	Usuwanie odpadów
8	Włączanie i wyłączanie		
8	Ustawianie timera		
9	Regulacja prędkości masażu stóp		
9	Regulacja siły kompresji powietrza		
9	Włączanie i wyłączanie funkcji podgrzewania		
9	Korzystanie z pilota zdalnego sterowania		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbol w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Masażer został zaprojektowany do relaksującego masażu stóp. Masaż może wspierać ukrwienie stóp i usuwać skurcze.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych, terapeutycznych ani medycznych.



Produkt przewidziany jest do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Aby uniknąć niebezpieczeństwa nie należy używać produktu np. w łazience ani w saunie.

Nie wolno stosować produktu u zwierząt.

Nie należy używać urządzenia ...

- ... w przypadku schorzeń lub zranień na stopach (np. otwartych ran, brodawek, grzybicy stóp, wysypki, opuchlizny lub zapalenia skóry stóp),
- ... w przypadku chorób nóg lub stóp (np. zapalenia żył, żylaków),
- ... w przypadku nadciśnienia lub nieprawidłowego ciśnienia krwi, osteoporozy, cukrzycy lub zakrzepicy,

- ... jeżeli użytkownik cierpi na ciężką chorobę lub ma za sobą operację chirurgiczną stopy (stóp),
- ... w przypadku wszczepionego rozrusznika serca lub

- ... jeżeli użytkownik cierpi na chorobę serca lub nowotwór złośliwy,

- ... jeżeli użytkownik cierpi na zaburzenia przepływu krwi lub ograniczenia neurologiczne.

- ... w przypadku złego samopoczucia,

- ... w przypadku bólu o nieustalonej przyczynie,

- ... u osób z zaburzonym odczuwaniem ciepła.

Małe dzieci są bardziej wrażliwe na ciepło.

Zażywaniu pewnych leków lub niektórym chorobom, np. cukrzycy, mogą towarzyszyć zaburzenia w odczuwaniu temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedołążne nie zawsze dają po sobie poznać nadmierne działanie ciepła.

- ... u dzieci poniżej 3 lat, osób niedołążnych, chorych lub nieodczuwających ciepła.

W razie wątpliwości przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem!

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne.
Pilot wyposażony jest w baterię guzikową.
Połknięta bateria guzikowa może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci.
Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8. roku życia i osoby o
 - ... ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub
 - ... z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, jeśli...
 - ... są one pod nadzorem lub
 - ... zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użycia urządzenia i
 - ... zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa.Dzieci bez nadzoru nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produktu, zasilacza sieciowego ani kabla podłączeniowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Zasilacz należy włożyć do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego parametry napięcia są zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka...
 - ... jeśli podczas użycia wystąpią usterki,
 - ... po użyciu,
 - ... w czasie burzy,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel podłączeniowy.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie używać urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie można samodzielnie naprawiać ani wymieniać uszkodzonego kabla podłączeniowego. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wszelkie naprawy urządzenia lub kabla podłączeniowego powinny być wykonywane wyłącznie w zakładach specjalistycznych.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wewnętrzna podszewka w obu otworach na stopy nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli takie oznaki występują, nie należy kontynuować użytkowania masażera.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Do wymiany należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Nie wolno przykrywać pracującego urządzenia (np. kocem lub ręcznikiem).
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu benzyny lub innych łatwopalnych substancji.

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała



- Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne


- Urządzenie używać tylko w pozycji siedzącej. Nie wstawać po włożeniu stóp do urządzenia.
- Urządzenie zaprojektowano do jednorazowego cyklu pracy nieprzekraczającego 30 minut. Przed ponownym użyciem należy je pozostawić na przynajmniej 30 minut, aż ostygnie do temperatury otoczenia.

- Baterie/akumulatory należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterię należy wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nówek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na podłożu, należy umieścić podkładkę antypoślizgową pod urządzeniem.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

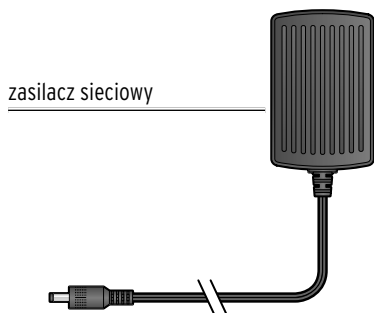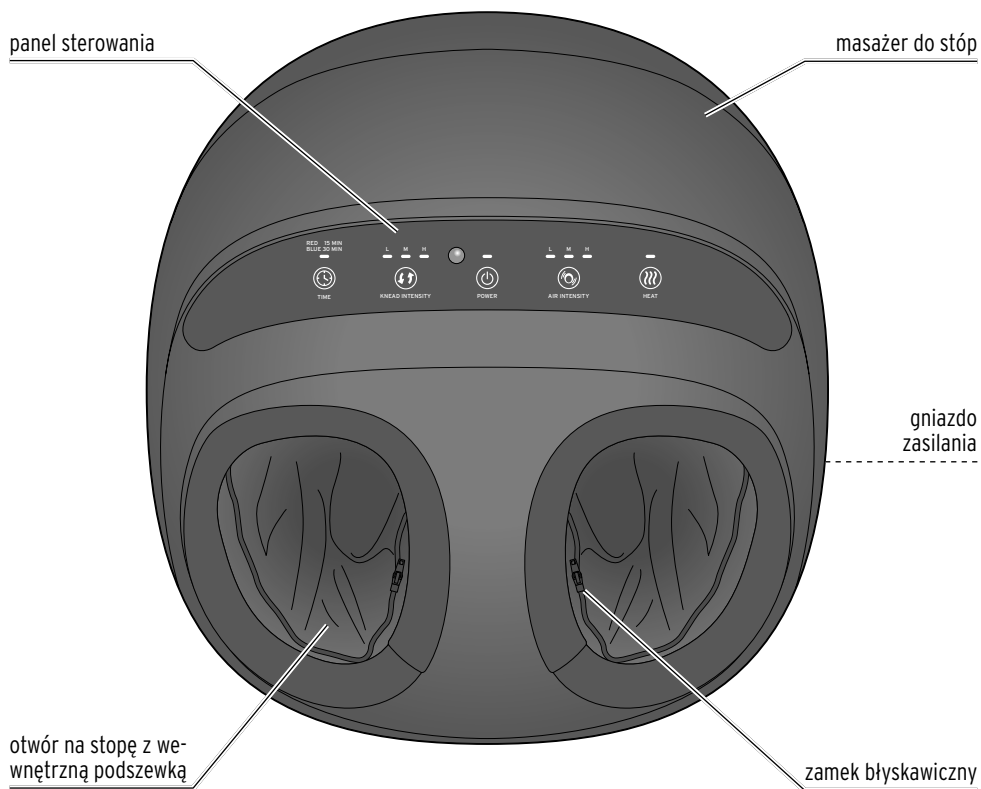

Pilot

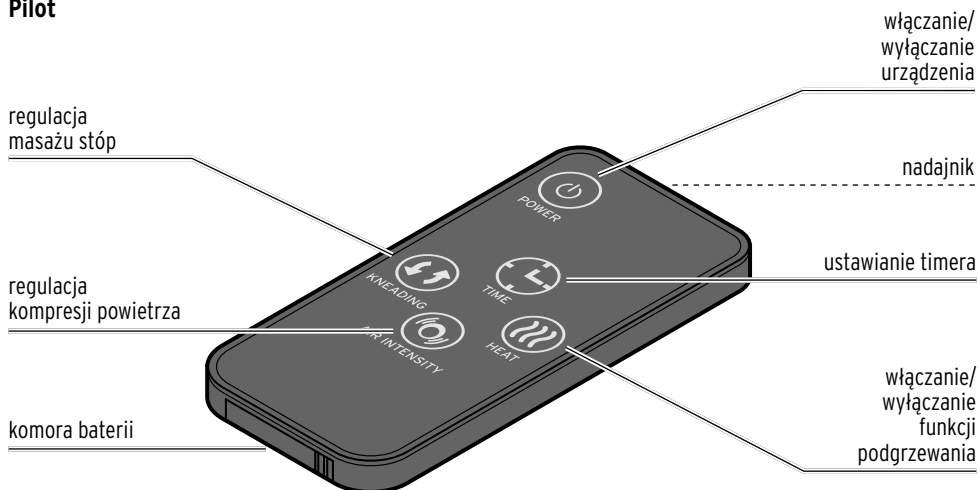

Panel sterowania

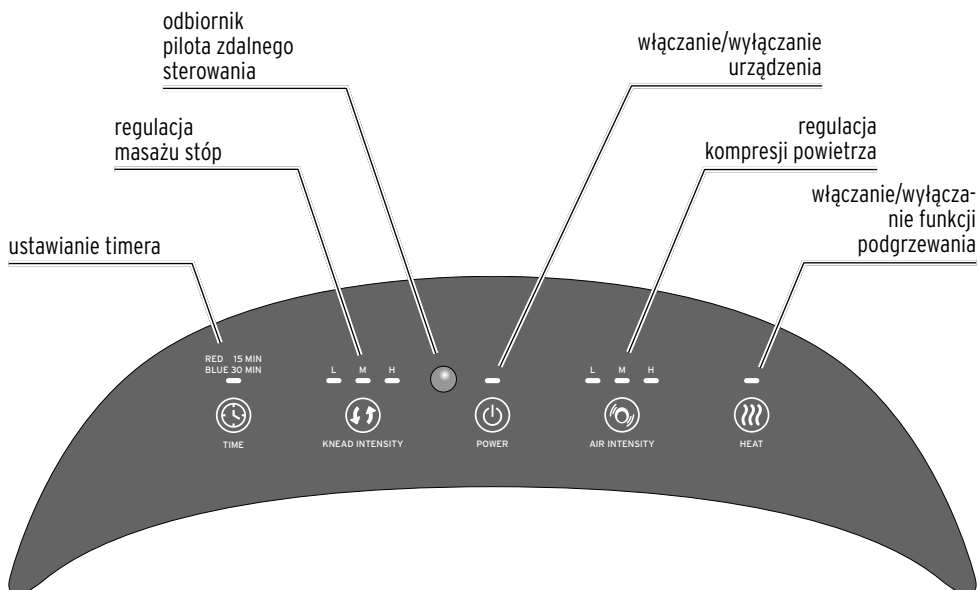


Przygotowanie do użytkowania




NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Najlepiej usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu.

1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Zdjąć folię ochronną z panelu obsługowego.

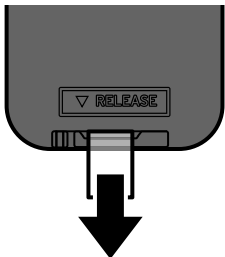

3. Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii pilota.

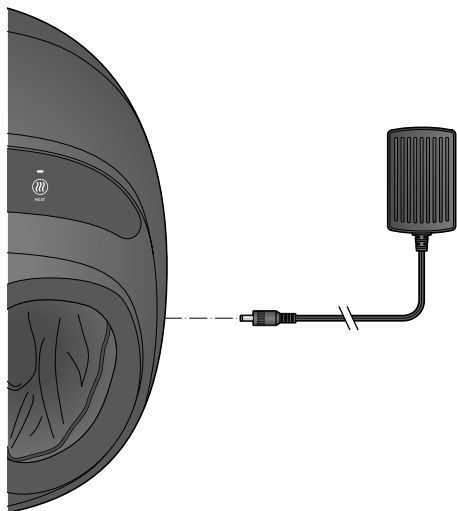

4. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego zasilacza do gniazda podłączeniowego masażera.
5. Włożyć zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
6. Rozbrzmiewa jeden sygnał akustyczny, a lampka kontrolna **Power** miga.

Obsługa

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Urządzenie zaprojektowano do jednorazowego cyklu pracy nieprzekraczającego 30 minut. Przed ponownym użyciem należy je pozostawić na przynajmniej 30 minut, aż ostygnie do temperatury otoczenia.

1. Usiąść wygodnie na krześle.
2. Włożyć stopy do otworów w urządzeniu.
3. Zrelaksować się.

Włączanie i wyłączanie

▷ Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk

Rozbrzmiewa jeden sygnał akustyczny, a lampka kontrolna **Power** świeci w sposób ciągły.

Ustawiony czas masażu wynosi 15 minut i jest on pokazywany na wyświetlaczu. Intensywność funkcji masażu stóp i kompresji powietrza jest ustawiona na niskim poziomie (**L**), a funkcja podgrzewania jest włączona.

Zapalają się odpowiednie lampki kontrolne.

▷ Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk

Rozlega się sygnał dźwiękowy, urządzenie zatrzymuje się i gasną wszystkie lampki kontrolne.

Ustawianie timera

Po włączeniu ustawiony jest czas pracy wynoszący 15 minut, a odpowiednia lampka kontrolna świeci na czerwono.

▷ Aby ustawić czas pracy na 30 minut, nacisnąć

Lampka kontrolna świeci na niebiesko.

▷ Aby ponownie ustawić czas pracy na 15 minut, ponownie nacisnąć

Jeżeli użytkownik wcześniej nie wyłączył urządzenia przyciskiem , wyłączy się ono automatycznie po upływie czasu pracy.

Regulacja prędkości masażu stóp

Po włączeniu prędkość funkcji masażu stóp jest ustawiona na niską (**L**).

- ▷ Aby zmienić prędkość masażu stóp, nacisnąć .

Zmiana ustawienia prędkości: umiarkowana (**M**) > wysoka (**H**) > wyłączona > (**L**) itd.

Regulacja siły kompresji powietrza

Po włączeniu siła kompresji powietrza jest ustawiona na niską (**L**).

- ▷ Aby zmienić siłę kompresji powietrza, nacisnąć .

Zmiana ustawienia siły kompresji powietrza: umiarkowana (**M**) > wysoka (**H**) > wyłączona > (**L**) itd.

Włączanie i wyłączanie funkcji podgrzewania

Po włączeniu podgrzewanie jest włączone, a lampka kontrolna  świeci się w sposób ciągły.

- ▷ Aby wyłączyć funkcję podgrzewania, nacisnąć .

Lampka kontrolna  gaśnie.

- ▷ Aby wyłączyć funkcję podgrzewania, nacisnąć ponownie .

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania


Można również sterować wszystkimi funkcjami za pomocą pilota.

- ▷ Skierować pilota z nadajnikiem na odbiornik i nacisnąć odpowiedni przycisk.

-  Włączanie i wyłączanie urządzenia
-  Ustawianie timeru
-  Regulacja prędkości masażu stóp
-  Włączanie i wyłączanie funkcji podgrzewania
-  Regulacja siły kompresji powietrza

Wymiana baterii


W przypadku, gdy urządzenie nie reaguje na polecenia wydawane za pomocą pilota, należy wymienić baterię.

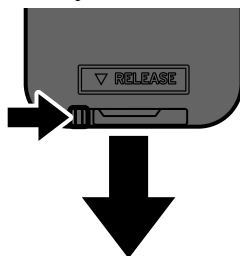


1. Nacisnąć zaczep w kierunku oznaczonym strzałką i wyciągnąć uchwyt na baterię.



Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy chwytać ją przez suchą, miękką ściereczkę.

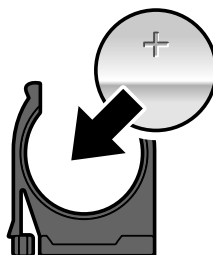

2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol **+** musi być skierowany ku górze).

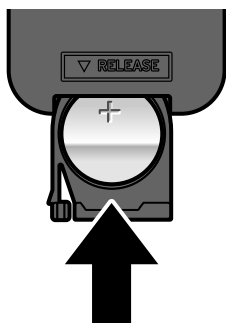

3. Ponownie całkowicie wsunąć uchwyt na baterię. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Czyszczenie i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym


- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka.
- Produktu ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Dopiero gdy podszewki całkiem wyschną, można włożyć je do masażera i podłączyć urządzenie do prądu.
- Pod żadnym pozorem nie włączać urządzenia, aby wysuszyć podszewki funkcją grzania.

1. Wyciągnąć zasilacz z gniazdka i pozostawić urządzenie na kilka minut do ostygnięcia.
2. Plamki można usunąć ścierką lub wilgotną gąbką.

Można wyjąć i wyprać wewnętrzne podszewki znajdujące się w otworach na stopy. Pranie podszewek przeprowadzać w następujący sposób:

3. Otworzyć zamki błyskawiczne znajdujące się na otworach na stopy.
4. Wyjąć podszewki z otworów na stopy.

5. Podszewki wyprać ręcznie w letniej wodzie z małą ilością lekkiego środka piorącego.
6. Przed ponownym użyciem lub schowaniem podszewek należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. W celu wysuszenia nie kłaść ich na grzejniku ani nie suszyć w suszarce bębnowej.

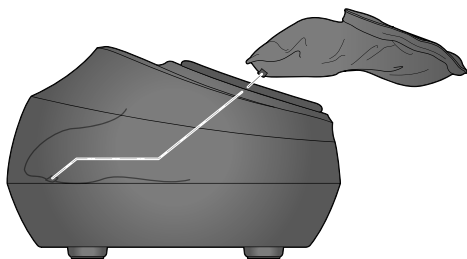

7. Z powrotem włożyć podszewki do otworów na stopy.
 8. Podszewki i otwory na stopy wyposażono w paski z rzepem. Zwrócić uwagę, aby ułożyć paski z rzepem z powrotem jeden na drugim. Następnie zamknąć zamki błyskawiczne.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa.	• Czy zasilacz jest włożony do gniazdka? • Czy wtyczka kabla podłączeniowego jest dobrze włożona do gniazda podłączeniowego?
Główce masujące obracają się bardzo wolno.	• Czy stopy za mocno naciskają na główce masujące? Stopy należy nakładać lekko.
Urządzenie wyłącza się podczas pracy.	• Urządzenie się przegrzało. Wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć zasilacz z gniazdka i pozostawić urządzenie na kilka minut do ostygnięcia. • Czy urządzenie pracowało przez 30 minut bez przerwy? Ze względów bezpieczeństwa urządzenie automatycznie wyłącza się po 30 minutach. Poczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.

Dane techniczne

Model:	MD-50230B
Numer artykułu:	647 030
Baterie:	1x CR2025/3 V (Li) energia znamionowa: 0,45 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Zasilacz sieciowy:	
Model:	IVP1200-2500G
Producent:	(Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd., 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. China)
Klasa ochronności:	II 
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	12,0 V 2,5 A 30,0 W
	(symbol  oznacza prąd stały)
	(symbol  wskazuje biegunowość wtyczki)
Sprawność	średnia podczas pracy: > 86,95%
	przy niskim obciążeniu (10%): > 85%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	< 0,1 W
Klasa ochronności:	III 
Tryb pracy krótkotrwałej:	30 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Niemcy)



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwy-

kłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Model:

MD-50230B

Producent:

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Niemcy)